

## メディマットシリーズのメンテナンス(洗濯・衛生処理方法)

1. おしっこや便などでカバーが汚れた場合は、汚れた箇所をぬれたタオルでキレイに拭き取り、アルコールなどで消毒して下さい。  
また、汚れがキレイに拭き取れない場合は通常の洗濯を行って下さい。  
通常の洗濯ができない場合は、カバーを外さずに汚れた箇所にぬるま湯をかけて、暫くおいてからスポンジなどに洗剤を含ませ軽く泡を立て、部分洗いをしてください。その後、ぬれたタオルで泡をキレイに拭き取り、アルコールなどで消毒して下さい。  
**※ カバーを取り外す場合、ウレタンを無理にひっぱり出すと亀裂・破損の原因となります。カバーのファスナーをしっかりと下ろしウレタンをゆっくり引き出して下さい。**
2. 天日干しは必要ありません。普段のお手入れはシーツの交換とカバーの洗濯・洗浄のみです。干す場合は陰干しをして下さい。天日干しをしなくても、ダニ・カビの繁殖を防ぎますので安心してお使い下さい。  
**※ 直射日光を当てると変色・劣化の原因となります。**
3. カバーに付着した洗浄液、薬液、軟膏などの長時間放置したシミや黒ずみなどは、通常の洗濯では落ちない場合があります。その際は、クリーニング専門店にてドライクリーニングを行って下さい。  
ドライクリーニング後、丁寧に水洗いを行って下さい。ほとんどのシミ類は取り除くことができます。  
**※ 但し、漂白剤・脱色剤などの染料などのシミはとれません。**
4. 日々の使用により、皮脂や汚れなどがカバーに付着して、水蒸気の透過性が低下した場合、もしくは撥水性が低下した場合は通常の洗濯を行って下さい。通常の洗濯ができない場合はカバー全体に低濃度のアルコールを噴きかけるか、もしくはアルコールなどが含まれる消毒用ペーパーなどで油脂分を拭き取って下さい。  
**※ 汚れや油分が付着していると水蒸気の透過性が低下する場合があります。**
5. 内部ウレタンにニオイがある場合は、その箇所に直接、消毒液もしくは消臭液を噴霧してその箇所を数回、やさしく手押ししてからしばらく放置して下さい。

テックワン株式会社

〒929-0124 石川県能美市浜町ヌ 161-4

TEL 0761-55-0761 FAX 0761-55-4175

URL <http://www.tecone.co.jp/>